

DOMANDE FREQUENTI

Quando e come devo lavare una ferita?

E' bene sapere che le lesioni cutanee guariscono meglio e più velocemente quando sono pulite.

Sciacquare accuratamente la ferita con acqua fredda potabile o con una soluzione salina sterile, in modo da rimuovere eventuali tracce di sporco o di materiale rimasto sulla ferita. Asciugare tamponando e procedere poi con un'attenta disinfezione sfruttando il potere effervescente dell'acqua ossigenata. Ciò permette di combattere la colonizzazione batterica.

Quando devo usare un antisettico?

Salvo diversa prescrizione medica, disinfettare sempre e regolarmente la ferita con specifico antisettico, sciacquare con acqua e si può applicare un cerotto Pic con tampone con antibatterico contenente Clorexidin, che protegge la ferita dai rischi di infezione.

Perché usare un cerotto PiC con tampone con Clorexidina?

La Clorexidina contenuta nel tampone dei cerotti PiC offre un ampio spettro di azione antibatterica sul tampone. Agisce infatti sulle cellule microbiche di varia natura e ne inibisce il processo di moltiplicazione.

Ci sono restrizioni particolari nell'utilizzo della clorexidina (ad esempio bambini, diabete...)?

La Clorexidina è largamente utilizzata . La soggettività del singolo individuo può però portare a restrizioni nel suo utilizzo.

Quando è necessario cambiare la medicazione?

Rinnovare la medicazione quando necessario, ad esempio quando è sporca, imbevuta di essudato o ha perso l'adesività

I cerotti PiC con tampone con antibatterico si possono usare sui bambini?

Sì!

Se ho il diabete, posso usare i cerotti PiC con tampone con antibatterico?

Nei diabetici le ferite guariscono più lentamente e presentano un maggiore rischio di infezione. I cerotti Pic con tampone antisettico sono una soluzione ottimale per aiutare la guarigione di ferite e abrasioni anche per chi soffre di diabete.

Autorizzazione Ministeriale del 29.12.2014